

mogie.



SUIVI CARDIAQUE
HEART RATE MONITORING



SATURATION EN OXYGÈNE
SPO₂ MONITORING



PRESSION SANGUINE
BLOOD PRESSURE MONITORING



MODE MULTISPORTS
SPORT MODES



MODE SOMMEIL
SLEEP MONITORING



ÉTANCHÉITÉ : IP68
IP68 CERTIFIED



ÉCRAN LED
LED SCREEN

Manuel d'utilisation

Modèle : Bague connectée Mogie.
Modèle Saturn

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : Acier inoxydable / Epoxy / PCB
- **Épaisseur** : 2,5 mm
- **Compatibilité** : iOS (à partir d'iOS 10.0), Android (à partir d'Android 5.0)
- **CPU** : Germany DiaLog DA-14585
- **G-sensor** : SC7A20
- **Capteur cardiaque** : Tianyi 3918
- **Écran LED**
- **Affichage écran** : Heure / Rythme cardiaque / Oxymètre / Nombre de pas / Sommeil
- **Accéléromètre**
- **Contrôle gestuel**
- **Version Bluetooth** : 5.1
- **Batterie (bague)** : 16 mAh
- **Résistance à l'eau** : IP68
- **Application** : JRing

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Ne pas exposer la bague à des températures extrêmes.
- Ne pas démonter ni modifier la bague.
- Ne pas utiliser la bague près de champs magnétiques puissants.
- Ne pas charger avec un autre câble que celui fourni.
- Ne pas charger la bague dans un environnement humide.
- Ne pas ignorer une irritation ou une rougeur sur la peau.
- Ne pas laisser la bague tomber ou subir de chocs.
- Ne pas la laisser à la portée des enfants ou des animaux.
- Ne pas percer, écraser ou jeter la bague au feu.
- Ne pas utiliser la bague si elle dégage une odeur ou chauffe anormalement.
- Ne pas prêter la bague sans la réinitialiser.
- Ne pas oublier de mettre à jour le firmware régulièrement.
- Ne pas nettoyer avec de l'alcool ou des produits chimiques.
- Ne pas porter la bague pendant l'application de cosmétiques ou produits ménagers.
- Ne pas laisser la bague inutilisée pendant une longue période sans la recharger occasionnellement.

UTILISATION DU PRODUIT

Mise sous tension

La bague est constamment allumée tant qu'elle a de la batterie, et elle s'éteindra automatiquement lorsque la batterie sera insuffisante.

Application (JRing)

Pour profiter de votre bague connectée, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, recherchez l'application «JRing» sur votre Apple Store/Google Play.



Jumelage

Ouvrez l'application JRing sur votre smartphone.

Commencez par suivre les étapes, à savoir renseigner vos informations personnelles, et jumelez la bague (en appuyant sur «Ajouter un périphérique»).

Vous pourrez commencer à l'utiliser et les données pourront être synchronisées automatiquement.

Accueil

Cet écran affiche toutes les données récoltées par la bague (nombre de pas, qualité du sommeil, fréquence cardiaque...).

Vous pourrez en voir plus en appuyant sur les différentes données, et ainsi consulter l'historique de chaque donnée par date.

Activité

Cet écran permet de lancer une récolte de données pendant une activité (marche, vélo, course, escalade...) et de suivre sa position sur GPS.

Bague

Cet écran permet de modifier les options de la bague connectée ou de la dissocier de l'application.

Moi

Cet onglet vous permet de modifier vos données personnelles.



mogie.

JG FASHION SAS
38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.mogie.fr

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produit importé par JG FASHION SAS. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SAS. Made in China.



LDPE

Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package.