

mogie.



SUIVI CARDIAQUE
HEART RATE MONITORING



SATURATION EN OXYGÈNE
SPO₂ MONITORING



MODE MULTISPORTS
SPORT MODES



MODE SOMMEIL
SLEEP MONITORING



NIVEAU D'ÉTANCHÉITÉ : IP68
IP68 CERTIFIED



DÉCLENCHEUR PHOTO
REMOTE SHUTTER

Manuel d'utilisation

Modèle : Bague connectée Mogie.
Modèle Titan

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : ABS / Acier inoxydable / PCB
- **Compatibilité** : iOS (à partir d'iOS 10.0), Android (à partir d'Android 8.0)
- **Capteur cardiaque**
- **Version Bluetooth** : 5.1
- **Batterie (bague)** : 18 mAh
- **Autonomie** : 5 jours / cycle
- **Résistance à l'eau** : IP68
- **Application** : SmartHealth

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Ne pas exposer la bague à des températures extrêmes.
- Ne pas démonter ni modifier la bague.
- Ne pas utiliser la bague près de champs magnétiques puissants.
- Ne pas charger avec un autre câble que celui fourni.
- Ne pas charger la bague dans un environnement humide.
- Ne pas ignorer une irritation ou une rougeur sur la peau.
- Ne pas laisser la bague tomber ou subir de chocs.
- Ne pas la laisser à la portée des enfants ou des animaux.
- Ne pas percer, écraser ou jeter la bague au feu.
- Ne pas utiliser la bague si elle dégage une odeur ou chauffe anormalement.
- Ne pas prêter la bague sans la réinitialiser.
- Ne pas oublier de mettre à jour le firmware régulièrement.
- Ne pas nettoyer avec de l'alcool ou des produits chimiques.
- Ne pas porter la bague pendant l'application de cosmétiques ou produits ménagers.
- Ne pas laisser la bague inutilisée pendant une longue période sans la recharger occasionnellement.

UTILISATION DU PRODUIT

Mise sous tension

La bague est constamment allumée tant qu'elle a de la batterie, et elle s'éteindra automatiquement lorsque la batterie sera insuffisante.

Application (SmartHealth)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, recherchez l'application «SmartHealth» sur votre Apple Store/Google Play.



Jumelage

Ouvrez l'application SmartHealth sur votre smartphone.

Commencez par suivre les étapes, à savoir renseigner vos informations personnelles, et jumeler la bague. Vous pourrez commencer à l'utiliser et les données pourront

être synchronisées automatiquement.

Ces données peuvent aussi être synchronisées manuellement via l'application, en glissant votre doigt vers le bas lorsque vous êtes sur l'accueil. Plus il y a de données à synchroniser, plus la synchronisation prendra de temps. Elle peut durer jusqu'à deux minutes.

Accueil

Cet écran affiche toutes les données récoltées par la bague (nombre de pas, qualité du sommeil, fréquence cardiaque...).

Vous pourrez en voir plus en appuyant sur les différentes données, et ainsi consulter l'historique de chaque donnée par date.

Sport

Choisissez l'activité à effectuer dans les onglets en haut. La bague récoltera les données durant l'activité, puis les synchronisera avec l'application, si la bague est bien connectée en bluetooth à celle-ci. Toutes ces données seront affichées dans cet onglet.

Mien

Cet onglet vous permet de modifier vos données personnelles, de voir l'état de batterie de la bague, de la dissocier ou de la mettre à jour.



mogie.

JG FASHION SAS
38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.mogie.fr

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produit importé par JG FASHION SAS. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SAS. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package.